

VIZELET MINTAVÉTELI PROTOKOLL

genosmartDX PC-Alarm Focus



A helyes mintavételi eljárás betartásával jelentősen növelheti a vizsgálat pontosságát és megbízhatóságát. Az Ön együttműködése és a protokoll pontos követése tehát kulcsfontosságú a sikeres vizsgálat érdekében.

A vizelet mintavétel egy nem-invazív, könnyen kivitelezhető folyamat, amely lehetővé teszi a **PC-Alarm Focus** molekuláris diagnosztikai vizsgálat elvégzését.

A vizsgálatához a **reggeli első**, felkelés utáni vizeletéből javasolt mintát vennie, de legalább a mintavételt megelőző három órán belül ne ürítsen vizeletet. Bizonyos gyógyszerek és eljárások (pl. kemoterápia, sugárterápia, prosztatát érintő sebészeti beavatkozások) befolyásolhatják a vizelet összetételét. Ezért kérjük, a mintavétel időzítésénél vegye figyelembe, hogy a kemoterápia vagy a sugárterápia után legalább két hetet, míg prosztatát érintő sebészeti eljárás után legalább hat hetet várjon a mintavétellel. **Szíveskedjen, a mintavételt megelőző 24 órában kerülni a szexuális aktivitást.**

A mintavétel előtt elengedhetetlen a megfelelő higiéniai előkészület. Alaposan mossa meg a kezét, majd langyos, szappanos vízzel tisztítsa meg a hímvesszőjét és a makkot, végül törölje szárazra tiszta törülközővel vagy papírtörülővel. A vizelés megkezdése előtt húzza hátra a fitymáját a húgycsőnyílás szabaddá tételéhez.

A **vizeletmintát** a vizsgálatához biztosított, **narancssárga stabilizátort tartalmazó steril mintavételi csőbe kell gyűjtenie**. A cső belső felületét és a kupak belsejét ne érintse meg a mintavétel során a kontamináció elkerülése érdekében. Az **elsősugaras vizelet mintavételi technikát alkalmazza**, ami azt jelenti, hogy a vizezés első szakaszából kell mintát vennie (körülbelül **30-40 ml**), majd a maradék vizeletét a WC-be ürítse.

A vizelet összegyűjtését követően a **csövet azonnal, szorosan zárja le**. Ellenőrizze, hogy a cső nem szivárog, biztosítva ezzel, hogy megfelelő mennyiségű minta érkezzen a laboratóriumba. A **mintavételi csövet többször óvatosan forgassa fel-le**, hogy a stabilizátor teljesen feloldódjon a vizeletben.

A vizeletmintáját szobahőmérsékleten tárolja, közvetlen napfénytől védve, és a mintavételt követő néhány napon belül (maximum egy hét) juttassa vissza laboratóriumunkba.




Mintavételt reggeli első, felkelés utáni vizeletéből javasolt.



A mintavételt megelőző 24 órában kerülje az intimtást.



Alaposan mossa meg a kezét és tisztítsa meg intim testrészeit.

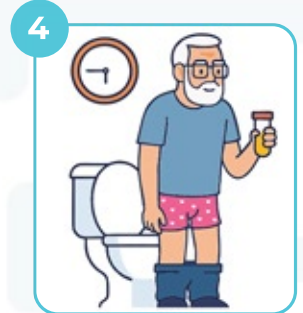

A vizeletmintát a narancssárga stabilizátort tartalmazó steril csőbe kell gyűjtenie.



Az mintavételi csövet zárja le, majd többször óvatosan forgassa fel-le, amíg a narancssárga stabilizátor teljesen fel nem oldódik.



A vizeletmintáját szobahőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve tárolja.



A mintát juttassa vissza a a vizsgálatot végző laboratóriumba.



Az eredményeket minden esetben beszélje meg kezelőorvosával.